

FICHA TÉCNICA

Revisão:00/22



| | |
|--|--|
| Nome Comercial: | Kit de higienização descartável Drybath |
| Nome Técnico: | Sabonete Facial e/ou Corporal sem Finalidade Específica - Grau 1 |
| Processo ANVISA: | 25351.239898/2017-67 |
| Fabricante: | Jalsosa SL |
| Local de fabricação | Espanha |
| Importador: | Disprocor Brasil Distribuidora e Importadora de Produtos Medicos LTDA – Rio de Janeiro/RJ |
| Descrição do produto: Trata-se de um produto de higiene pessoal totalmente descartável, que foi desenvolvido em formato de kit composto por 4 esponjas e 1 toalha. Ele é indicado para realizar a higienização corporal no paciente, de maneira prática, onde cada lado da esponja é designado para uma parte do corpo evitando assim realizar movimentos como em procedimentos tradicionais de ir e vir com o sabão pelo corpo, visando principalmente evitar a desmonitorização, infecção cruzada e movimentação excessiva em pacientes críticos. O fabricante atesta que o uso de 4 esponjas por banho é suficiente para higienizar todo o corpo do paciente, exceto os cabelos. A embalagem contém 4 unidades de esponja e 1 toalha. | |
| Composição e Dimensões: | <p>Esponja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fibra de 100 g/m ± 5% • Tamanho: 12 x 20 x 0.6 cm • Peso: Entre 2,5 e 3g <p>Gel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cor: Verde Azulado • pH: 5.5 • Composição: Água, Lauril Sulfato de Sódio, Cocamida (DEA), Cocoanfodiacetato dissódico, Ácido Cítrico, Perfume, Ácido Lático, Propilenoglicol, Ácido Málico, Extrato de Rosmarinus Officinalis, Extrato de Folha de Camellia Sinensis, Extrato de Flor Citrus Aurantium Amara, CI42090, CI 47005, CI 61570, Cloreto de sódio, Sulfato de Sódio, Hidróxido de Sódio, Benzofenona-4 <p>Toalha</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% viscose e 60% poliéster |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tamanho: 40 x 80cm |
| Instruções de Uso | <p>PASSO 1 Umedecer levemente uma esponja de cada vez. Usar um copo descartável ou um pequeno recipiente limpo para acondicionar a água. A água pode ser previamente aquecida. ATENÇÃO: Não mergulhar/imergir a esponja diretamente na água.</p> <p>PASSO 2 Friccionar na palma da mão a esponja, gerando a primeira espuma e em seguida esfregar delicadamente, ensaboando a pele do paciente. Essa esfoliação suave massageia, higieniza e retira a células mortas da derme. ATENÇÃO: Usa-se frente e verso da esponja, podendo se desmembrar em até 8 partes o procedimento no corpo do paciente.</p> <p>PASSO 3 Após o uso, descartar as esponjas imediatamente em local apropriado.</p> <p>PASSO 4 Secagem com a toalha superabsorvente, recolhendo a espuma gerada no procedimento. Descartar a toalha no lixo.</p> |
| Contraindicações: | Uso adulto. Não usar em crianças |
| Precauções e Advertências: | <p>Não ingerir Evitar contato com os olhos Uso Externo Manter fora das crianças</p> |
| Condições de Armazenamento e transporte: | <p>Armazenar em lugar fresco e seco. Transportar com cuidado, respeitando a quantidade de empilhamento a fim de evitar danos na embalagem do produto.</p> |
| Validade: | <p>Embalagem fechada: 36 meses Após aberto: 12 meses</p> |